

Döküman Kodu:
AH.FR.15

Yayın Tarihi:
13.01.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No:00

Sayfa No: 1/1

TARİH				
Sodalime temizliği yapıldı				
Gaz Devreleri cihazdan ayrıldı				
Taze gaz desteği kesildi				
Hasta devreleri ayrılıp değiştirildi				
Bakteri filtresi değiştirildi				
Basınç transduser tüpleri çıkarılıp değiştirildi				
O2 sensörü çıkarılıp ayrıldı				
Bakım parçaları bütünsel olarak cihazdan ayrıldı				
Manuel ventilasyon balonu gaytıyla cihazdan ayrıldı				
Manuel ventilasyon balonu gaytıdan ayrıldı				
Flow transduseri % 70 etil alkolde 1 saat bekletildi				
Flow transduseri bol distile suyla durulandı				
Flow transduseri yan konularak kurulandı				
Flow trans. Küçük kanalın pozisyonu kontrol edildi.				
Diğer parçalar dezenfektan solüsyonda bekletildi				
Bütün parçalar bol distile su ile durulandı				
Balonlar 105 - 120 derecede steril edildi				
Diğer parçaların tamamı otoklavda 134 derecede steril edildi.				
Tüm parçaların cihaza montajı yapıldı				
Cihaz fonksiyon testleri yapıldı				
ANESTEZİ TEKNİKERİ				
İMZA				