

Döküman Kodu:
AH.TL.23

Yayın Tarihi:
13.01.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No:01

Sayfa No:1/2

REVİZYON BİLGİSİ

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama
01.01.2022	01	SKS6.1'e göre Gözden geçirildi.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Anestezi Uzmanı	Kalite Müdürü	Genel Müdür
İmza	İmza	İmza

Döküman Kodu:
AH.TL.23

Yayın Tarihi:
13.01.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No:01

Sayfa No:2/2

1. AMAÇ: Hastanemizde PCA kullanım basamaklarının anlatılması

2. KAPSAM: Anestezi Hekimi, Anestezi Teknikerleri ve Hemşireleri kapsar.

3.KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5.SORUMLULAR: Tüm hekimler, hemşireler, sağlık memurları, anestezi teknisyen/teknikerleri

6.TALİMAT AKIŞI

6.1. Cihazın üzerinde hangi yoldan (IV veya epidural) bağlanacağı yazılı olmalıdır.

6.2. İnfüzyon sıvısının içinde bulunan ilaç adı ve konsantrasyonu yazılı olmalıdır.

6.3. Cihazın bataryası fişe takılır elektrik geldiğinden emin olunur.

6.4. Hastaya bağlanacak line steril olacak şekilde bağlanır.

6.5. Üçlü musluk ve klipslerin yönü ve açıklığı kontrol edilir.

6.6. Cihaz on/off düğmesine basılarak açılır.

6.7. Anestezi uzmanı ya da teknikeri tarafından cihaz programlanır (bazal infüzyon, bolus doz, kilitli kalma süresi, güvenlik ayarları).

6.8. Ekran press run/stop to infuse yazısı gelince run stop düğmesine basılır.

6.9. Cihaz çalışmaya başlar.

6.10. Cihazın alarm vermesi durumunda anestezi ekibine haber verilir.

6.11. PCA takılan hastaların takibi "**PCA Takip Formu**" ile yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. PCA Takip Formu